

SPUGNETTA SAPONATA

Art. Ref. 700878-500

Descrizione Prodotto

Spugna lava paziente monouso.
In schiuma di poliuretano biocompatibile.
Pre-saponata con detergente a pH neutro isocutaneo dermatologicamente testato e a bassa schiumosità.



Origine

Le materie prime sono di origine EU.
La spugna saponata è interamente prodotta in Italia.

Indicazioni

Lavaggio e detersione di incontinenti, non autosufficienti o allettati. Le spugne pre-saponate lava paziente sono utilizzate in tutti i reparti ospedalieri da parte di infermieri professionali.

Modalità d'uso

Inumidire leggermente la spugna ed esercitare alcune pressioni fino ad ottenere la quantità di schiuma desiderata. Applicare sulla parte del corpo da lavare ed eseguire la pulizia frizionando delicatamente la cute. Risciacquare la spugna e ripassare fino a completa detersione.
Prodotto monouso e mono paziente. Non riutilizzare. Non usare su cute lesa.
Gettare dopo l'utilizzo per evitare contaminazioni e/o infezioni crociate.

Dati tecnici

Qualità	Schiuma di poliuretano a cellule aperte
Composizione	100% poliuretano espanso flessibile
Densità	20 Kg./mq.
Saponatura	SI
Colore prodotto	bianco
Colore detergente	incolore
Dimensioni prodotto	125 x 80 x 20 mm.
Misura	unica
Periodo validità (Shelf Life)	36 mesi
Durata post apertura (PAO)	N. A. prodotto monoporzione e monouso

Composizione del detergente impiegato

INGREDIENTS: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocoamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Methyl Gluceth-20, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Chloride, Citric Acid, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Tetrasodium EDTA

Caratteristiche fisico-chimiche del detergente impiegato

Detergente incolore a schiuma controllata dermatologicamente testato: il detergente è stato sottoposto a "PATCH TEST" e, in base ai risultati ottenuti, è stato classificato "NON IRRITANTE". Formulato con materie prime di origine vegetale facilmente e rapidamente biodegradabili. La sua formula delicata, il pH 5,5 eudermico e l'aggiunta di sostanze emollienti e surgrassanti garantiscono un effetto nutriente oltre alla pulizia completa e delicata della pelle.

Informazioni aggiuntive

Prodotto monouso e mono paziente. Non riutilizzabile.

Prodotto LATEX FREE e FTALATI FREE

Non contiene sostanze chimiche irritanti o tossiche

Materiale altamente resistente alle deformazioni.

Il prodotto è registrato come COSMETICO nel CPNP al nr. 1644125

Il prodotto è Made in Italy

Tolleranza di legge $\pm 5\%$ su pesi e misure del prodotto finito

Analisi dei rischi

La schiuma di poliuretano è biocompatibile, non contiene sostanze nocive per la salute ed è conforme alle direttive europee in materia di salute, sicurezza ed ambiente.

I Patch Test eseguiti sia sul detergente tal quale sia sul prodotto finito impregnato garantiscono che il prodotto non provoca alcuna irritazione della cute umana.

La formulazione delicata del detergente ed il pH eudermico sono stati studiati per ridurre al minimo il rischio di allergie cutanee. Fenomeni allergici possono verificarsi esclusivamente in caso di persone che presentano allergia specifica verso uno o più ingredienti.

Controlli Qualità

Materie prime	I nostri fornitori possiedono le seguenti certificazioni: • ISO 9001:2015 (Quality Management Systems), • ISO 14001:2015 (Environmental Management Systems) • BS OHSAS 18001 (Health & Safety Management Systems)
Controlli delle Materie Prime	I controlli delle materie prime vengono effettuati da parte dei fornitori prima della spedizione. In ricezione viene eseguito il controllo visivo delle caratteristiche generali del materiale.
Prodotto finito	Le spugne pre-saponate lava paziente rientrano nella categoria dei Prodotti Cosmetici . I controlli quindi seguono le direttive del sistema di gestione integrato "Qualità-GMP-Ambiente", in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015, ISO 22716:2007 e ISO 14001:2015.
Controllo prodotto finito durante il processo produttivo	Durante il processo produttivo l'operatore esegue controlli di qualità secondo quanto previsto dalle direttive sopra indicate e delle quali possiede copia aggiornata.
Tracciabilità del prodotto	Il poliuretano, il detergente ed ogni confezione di prodotto finito sono identificati dal numero di Lotto di produzione. In tal modo è garantita la completa tracciabilità del prodotto.
Etichettatura	Le spugne sono confezionate singolarmente e su ogni bustina monoporzione è stampato il Lotto di produzione, la descrizione del prodotto, le modalità d'uso, le avvertenze e la formula del detergente. Gli imballi da 500 pezzi (10 buste da 50 pezzi) hanno un'etichetta riportante tutti i dati richiesti dalle norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti cosmetici.

Modalità di conservazione

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati.
Non stoccare il prodotto a temperatura < 5°C o > 40°C.
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, fonti di calore o luce solare diretta
N.B.: I raggi ultravioletti possono far virare il colore superficiale della spugna provocandone l'ingiallimento. Ciò non influisce sulle sue prestazioni fisico-meccaniche del prodotto. Si consiglia comunque di conservare il prodotto lontano dalla luce solare diretta.

Data di emissione: 15 Gennaio 2020
La presente Scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra precedentemente emessa.

Gestione dei rifiuti

Il prodotto utilizzato deve essere smaltito come rifiuto speciale sanitario in conformità alle normative vigenti.

Il codice CER ed il grado di pericolosità del rifiuto verranno stabiliti dall'utilizzatore finale in funzione dell'uso specifico che ne è stato fatto.

Packaging

Confezione primaria	Bustina 1 pezzo
Confezione secondaria	Sacchetto 50 pezzi
Imballo	Scatola 500 pezzi (10 buste x 50 pz.)
Unità di vendita	Scatola 500 pezzi
Dimensioni Imballo	cm. 40 x 40 x 80 h.
Peso imballo secondario	3,500 kg.
Imballi per pallet	18
Dimensioni pallet	cm. 80 x 120 x 255 h.
Peso pallet	63 kg.
Volume pallet	2,448 m ³

Data di emissione: 15 Gennaio 2020

La presente Scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra precedentemente emessa.